


G·HALVA



GUIDE DE VISÉE POUR
L'HALLUX VALGUS

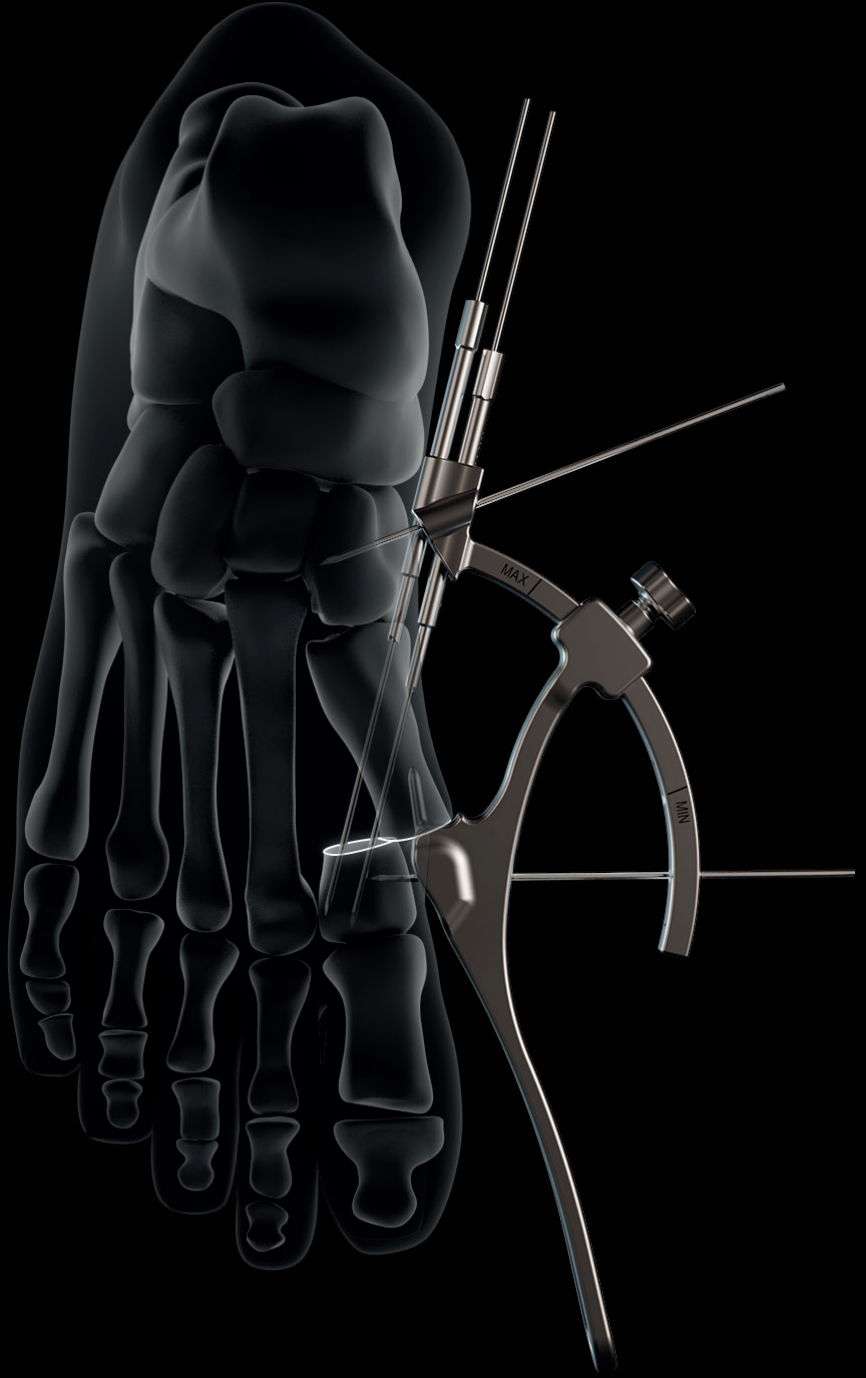



G·HALVA

GUIDE DE VISÉE POUR L'HALLUX VALGUS

Destination:


Les instruments Newclip Technics sont des instruments utilisables dans le cadre de la chirurgie orthopédique et traumatologique.

Caractéristiques techniques.


CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

GUIDE DE VISÉE DÉDIÉ AU TRAITEMENT PERCUTANÉ DE L'HALLUX VALGUS

- **Design symétrique unique**, compatible avec le pied gauche et le pied droit, conçu pour être **manipulable d'une seule main**.
- Translation de la tête de M1 combinée à la translation de la diaphyse de M1 pour verrouiller l'articulation TMT1.
- **Arc ajustable et incrémentable** pour un ciblage systématique de la tête du 1er métatarsien.
Un marquage noir sur l'arc indique les positions 'MIN' et 'MAX' autorisées afin d'éviter tout conflit avec le crochet intramédullaire.
- **Trajectoire contrôlée des broches** grâce à des guides parallèles ancrés dans la partie proximale du 1er métatarsien **(1)**.

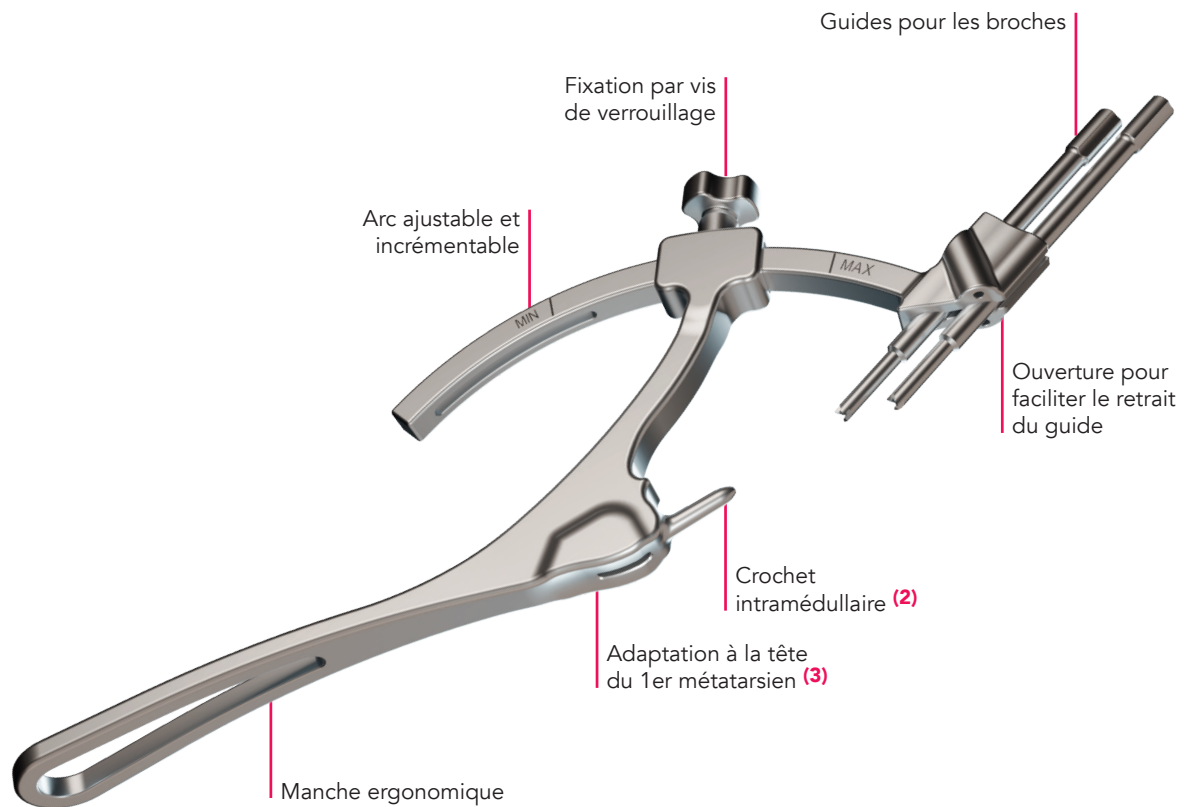

(1)

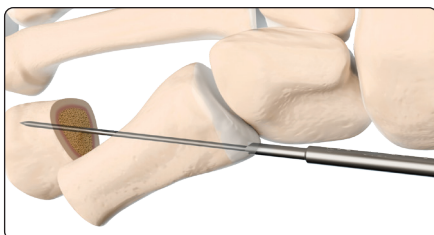


(2) (3)



POSITIONNEMENT ET FIXATION


- Broche pour la stabilisation de la tête du 1er métatarsien, perpendiculaire à l'axe de M2 (4).
- Broche pour maintenir le positionnement du guide de visée (5).

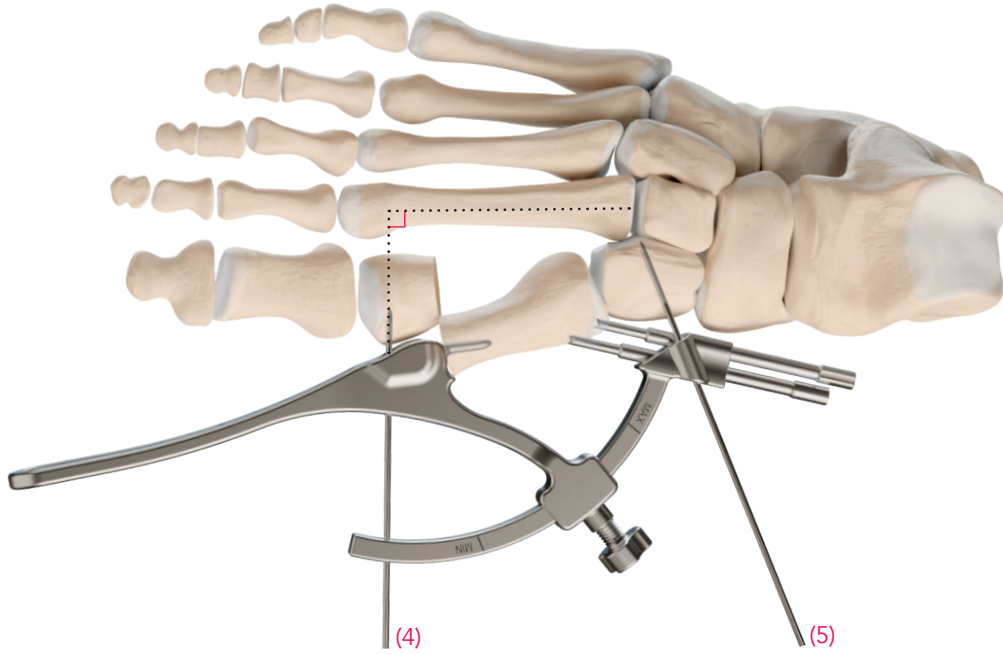

(4)




(5)

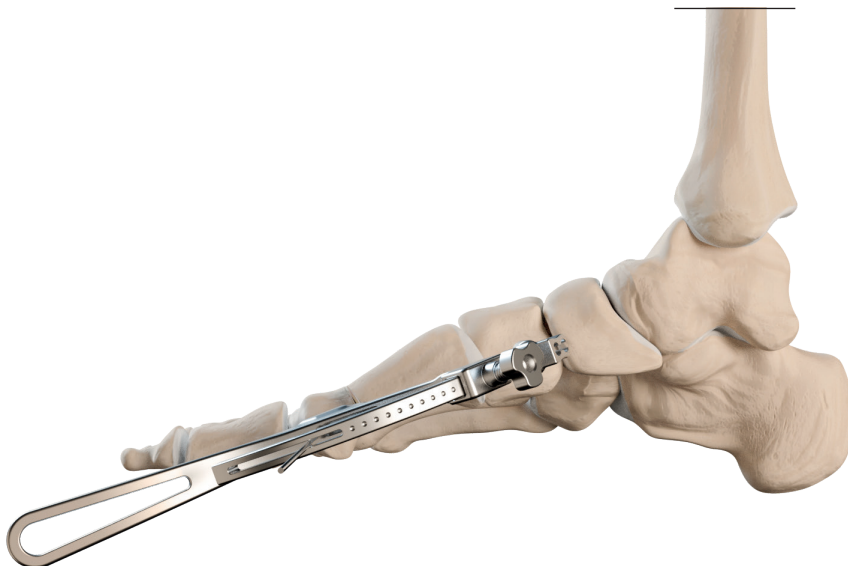


Technique opératoire.


OSTÉOTOMIE MINI-INVASIVE (PAGE 1/2)

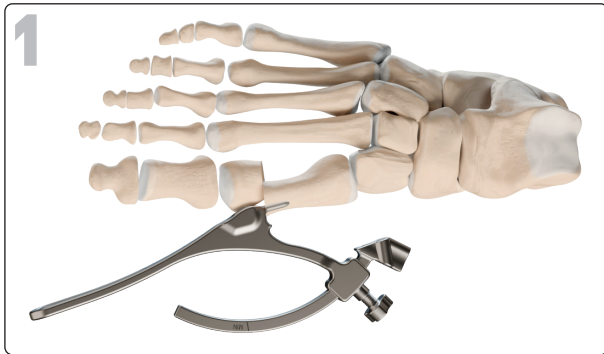


Réalisez une coupe percutanée de M1 en distal à l'aide d'une fraise dédiée. Puis, positionnez le guide de visée (ANC1713) en insérant le crochet dans le canal médullaire de M1.

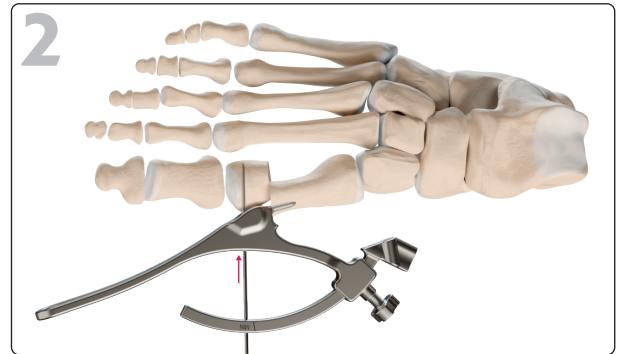

Insérez la broche Ø1,6 mm (33.0216.150) dans la tête de M1 à travers l'ouverture proximale de l'arc. La broche doit être perpendiculaire à l'axe de M2.

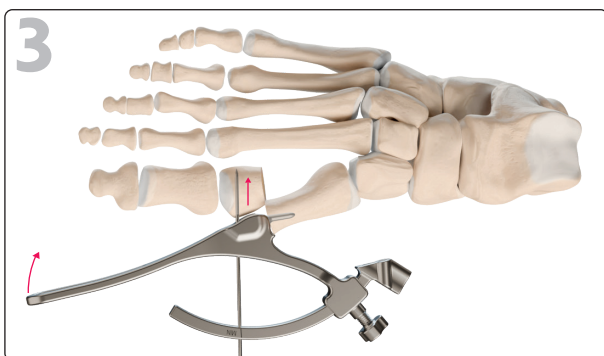


Réalisez la translation de la tête de M1 en utilisant le manche du guide de visée.

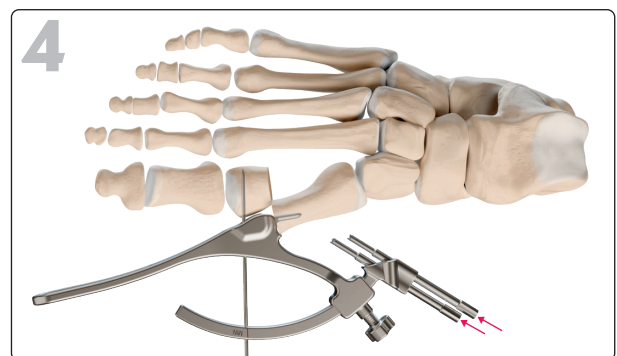


Insérez les guides broche (ANC1714) dans les trous dédiés du guide de visée.

OSTÉOTOMIE MINI-INVASIVE (PAGE 2/2)

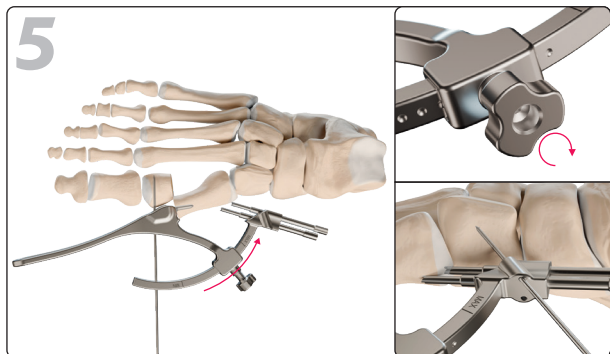


Faites glisser l'arc du guide afin que le point d'entrée du guide broche proximal soit placé le plus proximal possible de la diaphyse de M1, tout en s'assurant d'être entre les marquages MIN et MAX. Ensuite, verrouillez la vis.

N.B: Le guide de visée peut être fixé en position à l'aide de la broche Ø1,6 mm (33.0216.150).

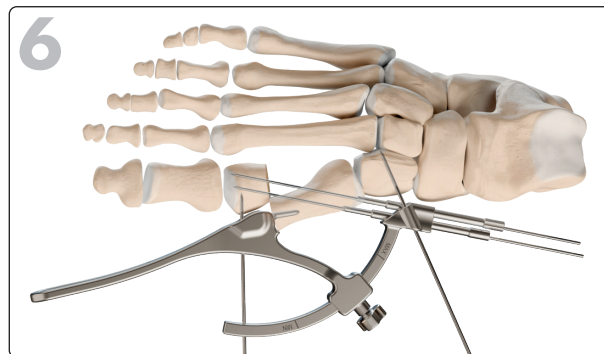


Ancrez les guides de broche dans la corticale osseuse et insérez les broches Ø1,4 mm (ANC1658) à travers les guides broche.

RÉSULTAT FINAL.

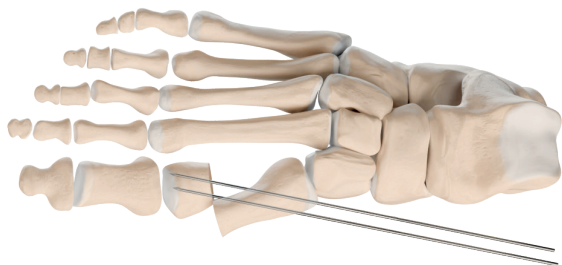



Vérifiez le positionnement des broches sous fluoroscopie. Enlevez les guides broche, la broche de Ø1.6mm et le guide de visée.

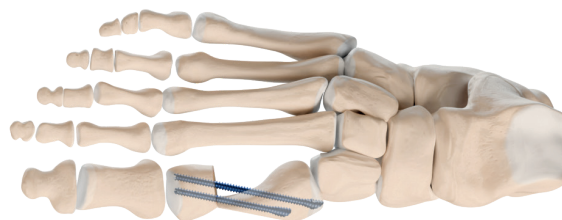


N.B: Cette technique chirurgicale peut être associée avec nos vis chanfreinées Ø3.5mm. Veuillez vous référer à la brochure Footmotion S pour plus d'informations.

Références des instruments.

#	Réf.	Désignation	Qté
01	ANC1658	Broche Ø1.4 - L180 mm	6
02	ANC1713	Bras de visée pour bunion MIS	1
03	ANC1714	Guide broche Ø1.4mm	2
04	33.0216.150	Broche Ø1.6mm - L150 mm	4
05	ANC1680/B	Conteneur d'instrumentation G-Halva - Base	
06	ANC1680/C	Conteneur d'instrumentation G-Halva - Couvercle	

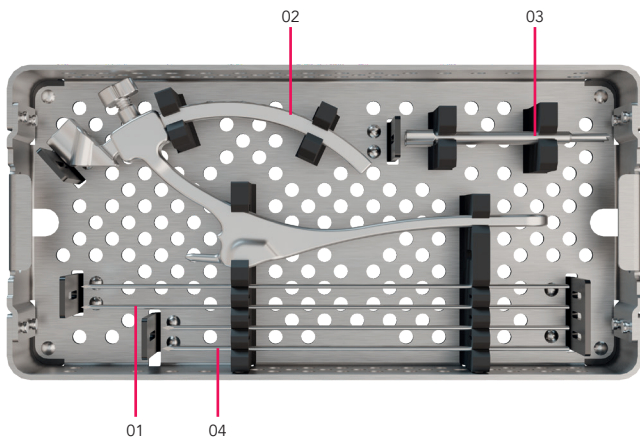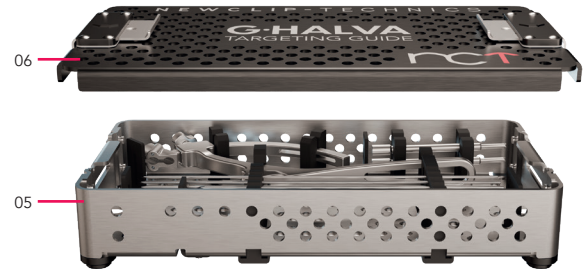

Il est recommandé de démonter les 3 parties du guide de visée pour le nettoyage :

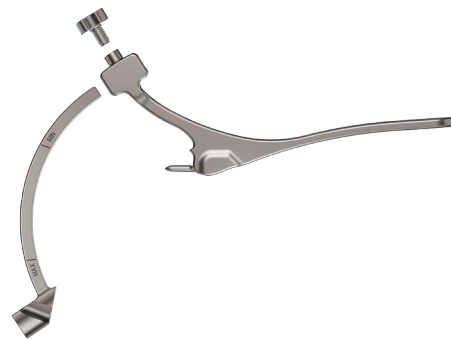

CONFIGURATION OPTIONNELLE DU KIT

Il est possible de commander le kit G-HALVA seul ou accompagné du kit de vis Ø3,5 mm compatible ^(a), regroupés dans un conteneur plus grand. Veuillez consulter la brochure Footmotion S pour plus de détails sur le kit de vis Ø3,5 mm.

#	Réf.	Désignation
07	ANC1434/B4	Conteneur - 1 niveau - Taille 1/2 - Base
08	ANC1755/C	Conteneur G-Halva - Couvercle



Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.

Fabricant : Newclip Technics - Brochure FR - G.HALVA - Ed.1 - 01/2025 - Dispositifs médicaux CE de classe IIa - CE1639 SGS BE. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Images non-contractuelles.

newcliptechnics.com

