

# XPERT WRIST 2.4 - VOLAR.



## TECHNIQUE MINI INVASIVE - PLAQUES TAILLE XS

### Destination:

Les implants de la gamme Xpert Wrist sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses de la main et de l'avant-bras chez l'adulte.

### Contre-indications :

- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers..

## RÉFÉRENCES

### PLAQUES PALMAIRES POUR RADIUS DISTAL

Ref.	Description
DTGVNS1	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête étroite - Extra courte - Gauche
DTDVNS1	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête étroite - Extra courte - Droite

### ANCILLAIRES MINI INVASIFS

Ref.	Description	Qté
ANC102*	Jauge de longueur vis Ø2.8 mm	1
ANC350	Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1	1
ANC696	Foret à encliquetage rapide Ø1.8 mm - L125 mm	2
ANC1061	Guide distal MIS de radius distal - Extra court - Droite	1
ANC1062	Guide distal MIS de radius distal - Extra court - Gauche	1
ANC908	Jauge guide non filetée Ø1.8 mm	1
ANC909	Jauge guide filetée Ø1.8 mm - MIS Xpert	2
ANC910	Tournevis T8 à encliquetage rapide AO	1
33.0218.080	Broche Ø1.8 L80 mm	2

\* Disponible dans le kit Xpert Wrist 2.4



DTGVNS1 DTDVNS1



ANC1062 ANC1061



ANC350



ANC696



ANC908



ANC909



ANC910

## TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Exemple avec une plaque extra short (DTDVNS1) et un guide MIS de radius distal (ANC1061)




1. Positionner le guide MIS (ANC1061) sur la plaque et le verrouiller à l'aide de la vis de fixation canulée en partie radiale.



2. Avec une incision radiale de 5 mm du carré pronateur, placer la plaque sous le carré pronateur en palmaire et sous la watershed line.




3. Insérer une broche Ø1.8 L80 mm (33.0218.080) en partie ulnaire du guide MIS pour stabiliser la plaque en partie distale.

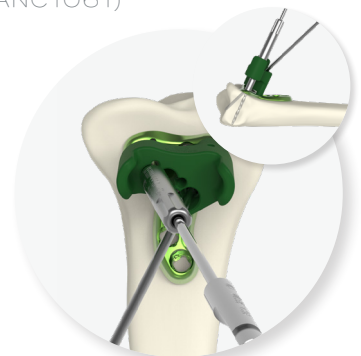

4. Insérer la jauge guide filetée (ANC908) dans le plot ulnaire du guide MIS (ANC1061). Percer à l'aide du foret (ANC696). Vérifier la position du foret (articulation radio-ulnaire et radio-carpienne) et réajuster le positionnement de la plaque si nécessaire. Mesurer la longueur de la vis sur la jauge guide.



5. Utiliser le tournevis T8 (ANC910) pour insérer la vis verrouillée (STD2.4Lxx).

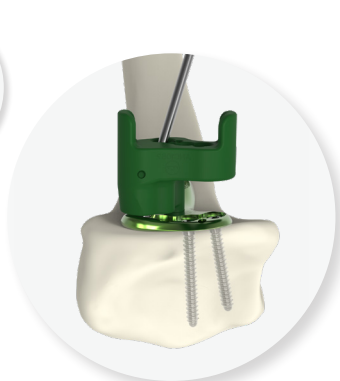

6. Procéder de la même manière que pour les étapes 4 et 5 pour le deuxième plot ulnaire.




7. Percer au travers du guide le plot adjacent au plot radial à l'aide du foret (ANC696) et ensuite percer le dernier plot radial.


Ensuite, retirer la broche et le guide.



8. Pour les deux plots de la partie radiale, mesurer la longueur des vis à l'aide de la jauge de longueur (ANC102) et insérer 2 vis verrouillées (STD2.4Lxx).

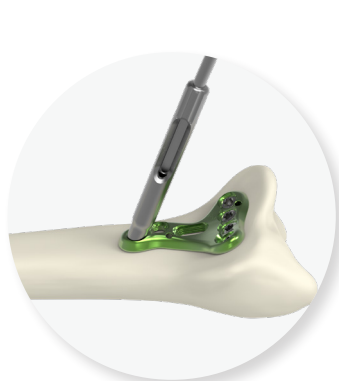


9. Verrouiller la jauge guide filetée (ANC909) sur le plot diaphysaire proximal à l'aide du tournevis T8 (ANC910).

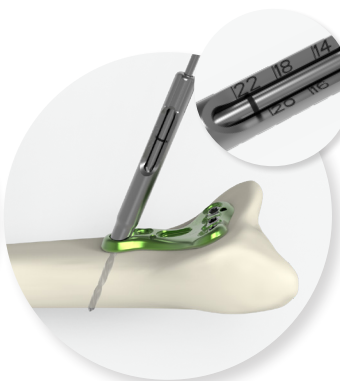

10. Percer à l'aide du foret (ANC696) et mesurer la longueur de la vis à l'aide de la jauge guide (ANC909).



11. À l'aide du tournevis T8 (ANC910) insérer une vis verrouillée (STD2.4Lxx) dans le plot diaphysaire proximal.

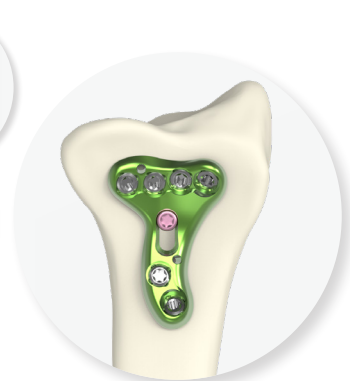

12. Procéder de la même manière pour insérer une dernière vis verrouillée en partie diaphysaire

Si besoin ajouter une vis verrouillée (STD2.4Lxx) ou une vis corticale (CT2.4Lxx) dans le plot oblong.



## RÉSULTAT FINAL

Les informations données sont destinées à présenter les produits NCT. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics.

Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.



NEWCLIP TECHNICS  
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garotières  
44115 Haute-Goulaine, France  
Tél. : +33 (0)2 28 21 23 25 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37  
commande@newcliptechnics.com  
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP USA  
642 Larkfield Center,  
Santa Rosa CA 95403, USA  
+ 1 707 230 5078  
customerservice@newclipusa.com  
www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS GmbH  
Pröllstraße 11,  
86157 Augsburg, Deutschland  
+49 (0)821 650 749 40  
info@newclipgmbh.com  
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS Australia  
3B/11 Donkin Street  
West End 4101, Australia  
+61 (0)2 81 886 110  
solutions@newclipaustralia.com  
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP Technics Japan K.K.  
KKK Bldg, 502, 3-18-1 Asakusabashi  
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053 Japan  
+81 (0)3 58 25 49 81  
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86  
www.newcliptechnics.fr